

DÉSODORISANT 3A



DÉSINFECTANT-DÉSODORISANT LARGE SPECTRE PUISSANT, POLYVALENT, ÉCONOMIQUE, BACTÉRICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE

PERFORMANCES - EFFICACITÉ

DESODORISANT 3A COLLECTIVITES avec son spectre exceptionnellement étendu (bactéries GRAM + et -, mycobactéries, mycoplasmes, microchampignons, moisissures, virus lipophiles, hydrophiles...) permet, même en présence de matières organiques, une parfaite prophylaxie sanitaire.

DESODORISANT 3A COLLECTIVITES assainit rapidement les locaux en désinfectant et désodorisant les surfaces même rugueuses.

L'activité anti-microbienne très élevée de **DESODORISANT 3A COLLECTIVITES** alliée à sa très basse toxicité en fait un désinfectant idéal.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Désinfection-désodorisation des sols, murs, mobiliers, éviers : couloirs, chambres de malades, sanitaires, salles d'opérations, ambulances, vestiaires, salles d'attente, tables, armoires...
- Désinfection de matériels professionnels et divers : instruments chirurgicaux, cuvettes, urinoirs, chariots, équipements dentaires...
- Désinfection-désodorisation des matériels pour collecte et transport des ordures et déchets : gaines de vide-ordures, véhicules de ramassage, poubelles...
- Assainissement d'atmosphère : périodique ou en continu pour locaux divers.

MODE D'EMPLOI

- Pour sols, murs, mobiliers, éviers, sanitaires, intérieurs d'ambulances et de SAMU : diluer **DESODORISANT 3A** de 1/100 à 1/1000 et traiter par lavage, pulvérisation, essuyage...
- Pour équipements d'ordures et déchets : diluer **DESODORISANT 3A** à 3 % et traiter par pulvérisation avec **PULBAN**, **ATOMIST**, machine à eau sous pression...
- Pour instruments chirurgicaux et dentaires ou petits matériels divers : diluer **DESODORISANT 3A** de 2,5 à 5 % et traiter par trempage durant 5 à 30 mn.
- Pour assainissement atmosphérique : diluer **DESODORISANT 3A** de 1 à 5 % et traiter avec **PURIFICATEUR D 100** ou **D 70**.